


# T-EZ Pro<sup>®</sup> Indicateur de lavage

REF TEZ/15

## Mode d'emploi:

1. Retirez le T-EZ Pro de son emballage juste avant de l'utiliser.
2. Fixez le T-EZ Pro sur le plateau. T-EZ Pro peut être utilisé avec une charge à vide ou pleine.
3. Un T-EZ Pro peut être placé sur un ou tous les niveaux du rack en fonction du niveau d'assurance requis. Voir le dessin ci-dessous comme exemple.

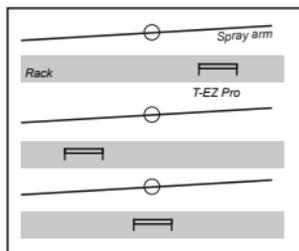

Rack à plusieurs niveaux

4. Sélectionnez le programme de nettoyage validé et démarrez le cycle.
5. Une fois le cycle de nettoyage terminé, évaluez les performances de nettoyage de la machine et du cycle.

a. La surface métallique est propre = nettoyage efficace et réussi



b. Si la surface métallique n'est pas propre, le cycle a échoué. Comparez avec la grille d'évaluation pour la résolution du problème.



6. Enregistrez le résultat de l'évaluation visuelle sur le formulaire de contrôle des lots.
7. T-EZ Pro peut être jeté avec les ordures ménagères.

REMARQUE: L'ISO 15883 et AAMI ST79 recommandent une surveillance quotidienne de l'efficacité du nettoyage.

🌡️ 18-25°C & 64-77°F

🕒 35-70%

🕒 18 mois à partir de la date de fabrication