


T-EZ Pro[®] Indicatore di lavaggio

REF TEZ/15

Istruzioni di utilizzo:

1. Rimuovere T-EZ Pro dalla confezione immediatamente prima dell'uso.
2. Fissare T-EZ Pro sul vassoio. T-EZ Pro può essere utilizzato a vuoto o a pieno carico.
3. T-EZ Pro può essere posizionato su uno o su tutti i livelli del rack a seconda del livello di garanzia richiesto. Vedere il disegno qui sotto come esempio.

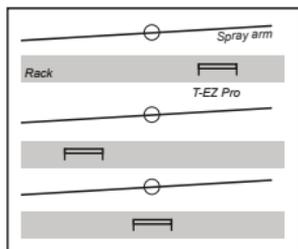

Rack multilivello

4. Selezionare il programma di lavaggio convalidato e avviare il ciclo.
5. Una volta completato il ciclo di lavaggio, valutare le prestazioni di lavaggio della macchina e del ciclo.

a. Una superficie metallica pulita = lavaggio avvenuto con successo.



b. Se la superficie metallica non é pulita, il ciclo non é avvenuto con successo. Per la risoluzione del problema comparare con la griglia di valutazione.



6. Registrare il risultato della valutazione visiva sul modulo di controllo del lotto.
7. T-EZ Pro può essere smaltito con i rifiuti domestici.

NOTE: ISO 15883 & AAMI ST79 raccomandano il monitoraggio quotidiano dell'efficacia di lavaggio.

 18-25°C & 64-77°F

 35-70%

 18 mesi dalla data di produzione