


T-EZ Pro® Reinigungsindikator

REF TEZ/15

Anwenderinformation:

1. Den T-EZ Pro kurz vor der Anwendung aus der Verpackung nehmen.
2. T-EZ Pro am Siebkorb fixieren. Der T-EZ Pro kann sowohl mit als auch ohne Beladung eingesetzt werden.
3. Je nach gefordertem Sicherheitsgrad den T-EZ Pro auf einer oder mehreren Ebenen platzieren, siehe Skizze.

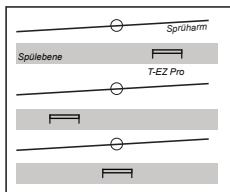

Wagen mit mehreren Spülebenen

4. Validiertes Programm auswählen und starten.
5. Nach Ablauf des Programms Reinigungsleistung visuell bewerten.
 - a. Keine Reste der Prüfanschmutzung sichtbar = Reinigung erfolgreich.
 - b. Reste der Prüfanschmutzung sichtbar = Reinigung nicht erfolgreich.
6. Das Ergebnis der visuellen Bewertung in das Chargenprotokoll eintragen.
7. T-EZ Pro kann über den normalen Hausmüll entsorgt werden.



Hinweis: ISO 15883 & AAMI ST79 empfehlen die tägliche Überprüfung der Reinigungsleistung.



18-25°C

35-70%

18 Monate ab Herstellung